

BULETIN TESTARI EFICACITATE

DESCRIERE PRODUS

KLINTENSIV® DEZINFECTANT SUPRAFETE este un dezinfectant de nivel înalt multifuncțional destinat curățării, decontaminării și dezinfectării suprafețelor ne-poroase, și instrumentelor non-critice în spitale, laboratoare și alte zone critice în care controlul contaminării încrucișate între suprafețele tratate este important. Este o soluție cu proprietăți detergente și dezinfectante, fără aldehide, cu un spectru larg de acțiune biocidă, creat în funcție de reglementările normelor armonizate europene privind dezinfecția.

COMPOZITIE CHIMICA

Substanțe active:

- Clorură de didecildimetilamoniu CAS:7173-51-5 , CE: 230-525-2 ,
- Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5, CE: 269-919-4

Alte ingrediente: surfactanți nonionici, parfum, agent de chelatizare și apă.

EFICACITATE BIOCIDA

KLINTENSIV® DEZINFECTANT SUPRAFETE		AVIZ NR.2266BIO/02/12.24					
Activitate biocida	Standard	Condiții testare	Organism testat	Concentrație	Timp contact	Reducție (lg) SR EN 14855	Rezultat testare
Bactericida	SR EN 1276	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	5 minute	lg ≥ 5	
Bactericida	SR EN 13697	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	5 minute	lg ≥ 4	Activitate bactericidală demonstrată
Bactericida	SR EN 13727	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	5 minute	lg ≥ 5	
Bactericida	SR EN 14561	Murdarie	Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Enterococcus hirae ATCC 10541	nediluat - ca atare	15 minute	lg ≥ 5	
Fungicida	SR EN 1650	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	5 minute		
Fungicida	SR EN 13624	Curatenie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	5 minute		
Fungicida	SR EN 13697	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	30 minute	lg ≥ 4	Activitate fungicidă demonstrată
Fungicida	SR EN 13697	Curatenie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	15 minute		
Fungicida	SR EN 14562	Murdarie	Aspergillus niger ATCC 16404	nediluat - ca atare	60 minute		
Lev erucida	SR EN 1650	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	5 minute		
Lev erucida	SR EN 13624	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	5 minute	lg ≥ 4	Activitate lev erucidă demonstrată
Lev erucida	SR EN 13697	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	5 minute		
Lev erucida	SR EN 14562	Murdarie	Candida albicans ATCC 10231	nediluat - ca atare	10 minute		
Sporicida	SR EN 13704	Curatenie	Bacillus subtilis ATCC6633	nediluat - ca atare	60 minute	lg ≥ 3	Activitate sporicidă demonstrată
Micobactericida/ Tuberculocida	SR EN 14348	Murdarie	Mycobacterium avium ATCC 15769 Mycobacterium terrae ATCC 15755	nediluat - ca atare	60 minute	lg ≥ 4	Activitate micobactericidă demonstrată
Virucida	SR EN 14476+A1	Murdarie	Poliovirus type 1 Murine Norovirus Adenovirus type 5	nediluat - ca atare	5 minute	lg ≥ 4	Activitate virucidă demonstrată

Aviz nr. 2266BIO/02/12.24 emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide